



MEMENTO
SIMPLIFIE
MEDTRONIC
MINIMED
PARADIGM
554/754®





MENU

1 – Réglage date et heure.....	Page 3
2 – Réglage débit de base.....	Page 4
3 – Revue de débit.....	Page 5
4 – Mise en place d’un nouveau réservoir.....	Page 6
5 – Bolus.....	Page 7
6 – Alarmes.....	Pages 8-9

REGLAGE DATE ET HEURE

Votre pompe est en mode VEILLE : « HEURE » à l'écran

1. Appuyer sur ACT pour allumer votre écran
2. Appuyer 3 fois sur ▼ pour sélectionner FONCTION
3. Appuyer sur ACT
4. Appuyer 2 fois sur ▼ pour sélectionner HEURE/DATE
5. Appuyer sur ACT
6. Réglage du format de l'heure : REGLAGE 24 HEURE sélectionné
7. Appuyer sur ACT
8. Appuyer sur ACT
9. A l'aide de ▲ et ▼ régler l'heure
10. Appuyer sur ACT
11. A l'aide de ▲ et ▼ régler les minutes
12. Appuyer sur ACT
13. A l'aide de ▲ et ▼ régler l'année
14. Appuyer sur ACT
15. A l'aide de ▲ et ▼ régler le mois
16. Appuyer sur ACT
17. A l'aide de ▲ et ▼ régler le jour
18. Appuyer sur ACT
19. Faire ESC jusqu'à retrouver l'écran initial



REGLAGE DEBITS DE BASE

Votre pompe est en mode VEILLE : « HEURE » à l'écran

1. Appuyer sur ACT pour allumer votre écran
2. Appuyer 1 fois sur ▼ curseur sur BASAL
3. Appuyer sur ACT
4. Appuyer 3 fois sur ▼ curseur sur PARAMETRER
5. Appuyer sur ACT
6. Appuyer 1 fois sur ▼ Régler débit basale
7. Appuyer sur ACT
8. A l'aide des flèches ▲ et ▼ régler le débit prescrit pour la période de temps commençant à minuit
9. Appuyer sur ACT
10. A l'aide des flèches ▲ et ▼ régler l'heure de début du 2^{ème} débit prescrit
11. Appuyer sur ACT
12. Recommencer l'opération autant de fois que vous avez de débits de base prescrits
13. Lorsque tous les débits prescrits sont programmés appuyer 2 fois ACT le total journalier apparaît
14. Faire ESC pour sortir et retrouver écran initiale



REVUE DES DEBITS

1. Appuyer sur ACT pour allumer l'écran
2. Appuyer 1 fois sur MENU BASAL
3. Appuyer sur ACT
4. Appuyer sur REVUE DES DEBITS
5. Appuyer sur ACT
6. Vérifier les débits basaux et les horaires
7. Appuyer sur ESC pour sortir



MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU RESERVOIR

1. Appuyer sur ACT pour allumer votre écran
2. Dans MENU PRINCIPAL, appuyer 1 fois sur ▼ curseur sur PURGE
3. Appuyer sur ACT
4. Dans MENU PURGE, appuyer 1 fois sur ▲ curseur sur Préparation réserv.
5. Lire le message concernant le retour du piston
6. Appuyer sur ACT
7. Lire le message
8. Appuyer sur ACT
9. Lire le message RETOUR PISTON TERMINE
10. Appuyer sur ACT
11. Dans PURGER TUBULURE, appuyer sur ▼ vérifier puis sélectionner OUI
12. Appuyer sur ACT
13. Lire le message
14. Appuyer sur ACT en continu pour purger le cathéter
15. Maintenir ACT puis lire le message
16. Appuyer sur ESC
17. Lire le message
18. Appuyer sur ACT
19. Dans PURGER CANULE, lire le message
20. Se piquer et retirer l'aiguille
21. Appuyer sur ACT ou ESC
22. S'affiche à l'écran le volume requis de la purge de canule

23. Appuyer sur ACT

BOLUS

Envoyer un bolus

1. Appuyer sur la touche b
2. Mettre la dose voulue à l'aide ▲
3. Appuyer sur ACT
4. Lire le message injection bolus

Annuler un bolus

1. Appuyer 5 fois sur ACT

Pour voir le dernier bolus

1. Appuyer sur ESC
2. Lire la première ligne

Pour rechercher historique des bolus

1. Appuyer sur ACT, menu bolus, ACT
2. Sélectionner historique bolus
3. Appuyer sur ACT

1. Dans HISTORIQUE BOLUS, faites défiler les bolus à l'aide des flèches ▼ et ▲
2. Appuyer sur ACT
3. Les détails des bolus apparaissent



4. Appuyer sur ESC pour quitter

ALARMES LES PLUS FREQUENTES

ALARME	CAUSE	CONDUITE A TENIR
PILE EPUISE	Piles en fin de vie.	Appuyer sur ESC puis ACT Changer la pile dans les meilleurs délais
PILE USEE	Piles hors d'usage.	Appuyer sur ESC puis ACT Changer immédiatement la pile Vérifier la programmation
LIMITE SANS PILE	Votre pompe a été plus d'une minute sans pile	Appuyer sur ESC puis ACT Reprogrammer l'heure et vérifier les réglages
PAS D'INJECTION	Réservoir vide ou occlusion	Appuyer sur ESC, puis sur ACT Vérifier le réservoir et le cathéter Repiquer si nécessaire Vérifier votre glycémie
STOP AUTO	Aucune touche pressée pendant la durée du stop auto	Appuyer sur ESC puis sur ACT pour continuer l'injection d'insuline
ERREUR MOTEUR	Problème moteur	Appuyer sur ESC, puis sur ACT Faire un autotest Se déconnecter et faire une amorce complète pour vérifier que la pompe redémarre sinon appeler NELLI MEDICAL
INJECT MAXIMUM	Trop insuline injectée par rapport à la programmation.	Appuyer sur ESC, puis sur ACT Vérifier votre glycémie
ERREUR TOUCHE	Touche pressée plus de 3mn	Appuyer sur ESC puis ACT
VERIF REGLAGES	Utilisation de la pompe sans avoir réglé l'heure et la date	Appuyer sur ESC puis sur ACT Reprogrammer les paramètres
ECHEC TEST PILE	Vous avez inséré une pile défectueuse	Appuyer sur ESC puis sur ACT Mettre une pile neuve
PAS DE RESERVOIR	Réservoir non ou mal insérer, injection arrêtée	Appuyer sur ESC puis ACT Vérifier ou remplacer le réservoir
RESERVOIR VIDE	Absence d'insuline dans le réservoir	Appuyer sur ESC puis ACT Remplacer le réservoir
RESERV BAS	Il ne reste que 20 unités dans le réservoir puis 10 unités	Appuyer sur ESC puis ACT Changer le réservoir si besoin
BOLUS ARRETE	Capot de pile dévissé ou la pompe a reçu un choc	Appuyer sur ESC puis sur ACT Aller dans historique des bolus pour connaître la quantité déjà reçue et programmer le complément
REPROGRAMMER	Réglages pompe effaces ou téléchargement PC non termine	Appuyer sur ESC puis ACT
E-XX	Message contrôle sécurité	Prendre contact avec NELLI MEDICAL



**En cas de problème technique,
un numéro unique : 01.46.49.80.60**