



MEMENTO SIMPLIFIE MEDTRONIC MINIMED 640G ®












MENU




- 1 – Réglage date et heure.....Pages 3-4
- 2 – Réglage débit de base.....Pages 5-6
- 3 – Revue de débit.....Page 7
- 4 – Mise en place d'un nouveau réservoir.....Pages 8-9
- 5 – Purge des bulles d'air.....Pages 10-11
- 6 – Changement du cathéter seul.....Pages 12-13
- 7 – Bolus.....Pages 14-15

REGLAGE DATE/HEURE

1. Appuyer sur menu 
2. Aller sur Fonction appuyer sur 
3. Aller sur HEURE ET DATE appuyer sur 
4. Appuyer sur HEURE : l'heure clignote baisser ou augmenter avec les
flèches  valider avec  puis les minutes clignotent baisser ou
augmenter comme avec l'heure et valider.
5. Format heure sur 24h
6. Aller sur date avec les flèches  valider 

7. Le mois clignote baisser ou augmenter avec les flèches  puis valider














, le jour clignote baisser ou augmenter avec les flèches  valider

, l'année clignote baisser ou augmenter avec les flèches  et
valider .




8. Pour finir valider l'enregistrement appuyer sur la touche .


9. Puis appuyer sur la touche

REGLAGE DEBIT DE BASE







1. Avec les flèches  aller sur basal puis valider 
2. Aller sur réglage insuline avec les flèches  puis valider 
3. Aller sur Régl. Schémas basaux avec les flèches  puis valider 
4. Valider schéma 1 avec  cliquer sur option avec  puis cliquer sur modifier avec 
5. Cliquer sur la 1ere ligne 0h pour régler l'heure de fin du débit qui clignote
diminuer ou augmenter avec les flèches  puis valider avec 
6. Ensuite le débit clignote régler avec les flèches  puis valider avec  et ainsi de suite.

7. Lorsque tous les débits sont programmés aller sur terminer avec les

flèches  puis valider  puis enregistrer en appuyant de nouveau sur .

8. Appuyer sur flèche retour  3 fois pour retourner à l'écran d'accueil.

REVUE DES DEBITS

1. Avec les flèches  aller sur basal puis valider 
2. Aller avec les flèches  sur Schémas basaux valider 
3. Valider schéma 1 avec 
4. Puis vérifier les débits basaux avec horaires
5. Appuyer sur la flèche retour  3 fois pour retourner à l'écran d'accueil.

MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU RESERVOIR

1. Cliquer sur menu



2. Descendre avec les flèches jusqu'à RESERVOIR + TUBULURE



valider



3. Appuyer sur NOUVEAU RESERVOIR AVEC



4. Lire le message concernant le retour piston

5. Appuyer sur



6. Lire RETOUR PISTON TERMINE










7. Remplir le réservoir

8. Connecter la tubulure au réservoir. NE PAS SE CONNECTER.

9. Appuyer sur suivant avec




10. Placer le réservoir dans la pompe et verrouiller. NE PAS SE CONNECTER.

11. Appuyer sur suivant avec 
12. Maintenir la touche  jusqu'au message RESERVOIR OK. NE PAS SE CONNECTER
13. Appuyer sur suivant avec 
14. PURGE TUBULURE en maintenant la touche  jusqu'à apparition des gouttes
15. Aller avec les flèches  aller sur suivant et valider 
16. PURGE CANULE :
17. Insérer le cathéter
18. Faire PURGE DE LA CANULE avec 
19. S'affiche à l'écran le volume requis de purge canule
20. 0.3ui cathéter 6mm - 0.5ui cathéter 9mm - 0.7ui cathéter tangentiel
21. Descendre avec les flèches  sur PURGER DE SUITE et valider 
22. L'écran d'accueil se remet automatiquement.

PURGE DES BULLES D'AIRES

1. Dans un premier temps faire remonter les bulles d'air vers le haut du réservoir en tapotant avec les doigts sur ce dernier.

2. Cliquer sur menu 

3. Descendre avec les flèches  jusqu'à RESERVOIR + TUBULURE


valider 

4. Appuyer sur NOUVEAU RESERVOIR AVEC 


5. Lire le message concernant le retour piston


6. Appuyer sur 


7. Lire RETOUR PISTON TERMINE


8. Appuyer sur suivant avec 

9. Placer le réservoir dans la pompe et verrouiller. NE PAS SE CONNECTER.

10. Appuyer sur suivant avec 

11. Maintenir la touche  jusqu'au message RESERVOIR OK. NE PAS SE CONNECTER

12. Appuyer sur suivant avec 

13. PURGE TUBULURE en maintenant la touche  jusqu'à disparition des bulles d'airs.

14. Aller sur suivant avec les flèches  puis valider avec 

15. Aller sur terminer avec les flèches  puis valider


16. L'écran d'accueil se remet automatiquement


CHANGEMENT DU CATHETER SEUL

17. Insérer le cathéter

18. Désadapter la nouvelle tubulure du cathéter

19. Adapter l'ancienne tubulure au nouveau cathéter

20. Cliquer sur menu 

21. Descendre avec les flèches  jusqu'à RESERVOIR + TUBULURE


valider 

22. Descendre avec les flèches  jusqu'à PURGE CANULE et valider



23. Valider PURGER avec 

24. Il s'affiche à l'écran la quantité de purge

25. Descendre avec les flèches  jusqu'à PURGER DE SUITE








26. Un petit bip retentit lorsque la purge est terminée





27. L'écran d'accueil se remet automatiquement.

BOLUS










Envoyer un bolus

1. Aller sur BOLUS avec les flèches  puis valider 
2. A l'aide des flèches  mettre le nombre d'unités voulu valider une 1ere fois avec  puis valider L'ADMINISTRATION DE BOLUS avec 
3. Lorsque le bolus est passé la pompe revient sur l'écran d'accueil

Annuler un bolus

1. Lorsque votre bolus passe en bas à gauche de l'écran s'affiche en jaune ARRÊT BOLUS appuyer sur 
2. Message « arrêter administration du bolus ? » s'affiche
3. A l'aide des flèches  aller sur OUI et valider 
4. Valider TERMINER avec 

Pour voir le dernier bolus

1. Cliquer sur menu 
2. Descendre avec les flèches  jusqu'à HISTORIQUE valider 
3. Descendre avec les flèches  jusqu'à HIST. QUOTIDIEN valider 
4. Aller dans le jour de votre choix avec les flèches  et valider 
5. Descendre avec les flèches  pour faire défiler.
- Appuyer 4 fois  pour revenir à l'écran d'accueil



**En cas de problème technique,
un numéro unique : 01.46.49.80.60**