

LibreView

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Accédez
à votre profil glycémique

www1.libreview.com

LibreView : Guide de démarrage rapide pour patients, 2018. Pour en savoir plus sur la manière dont Abbott Diabetes Care traite vos données personnelles, consulter <https://pat.libreview.com/articles/data-management-security>
Document de bon usage destiné aux patients utilisateurs du logiciel LibreView.


FreeStyle
Libre
SYSTEME FLASH AUTOMATISÉ DE GLUCOSE


Abbott


INST111505ADC41Z_MAI 2018

WWW1.LIBREVIEW.COM


FreeStyle
Libre
SYSTEME FLASH AUTOMATISÉ DE GLUCOSE


Abbott

Configuration du compte LibreView

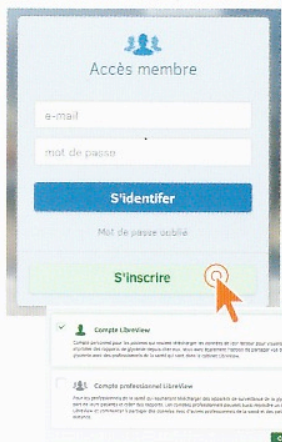

Si votre médecin vous a invité à rejoindre LibreView, cliquez sur le lien reçu par mail. Sinon, **connectez-vous sur www1.libreview.com**

CRÉEZ VOTRE COMPTE PATIENT

- 1 - Entrez votre adresse mail
- 2 - Choisissez votre mot de passe
- 3 - Inscrivez-vous
- 4 - Cliquez sur le lien d'activation qui vous a été envoyé par mail



TÉLÉCHARGEZ LES PILOTES LIBREVIEW

- 1 - Branchez le lecteur sur un port USB de votre ordinateur
- 2 - Cliquez sur Télécharger et laissez-vous guider

Si vous utilisez l'application FreeStyle Libre Link : les données de votre capteur sont disponibles dans LibreView dès que vous scannez votre capteur via l'application.

REJOIGNEZ LE CABINET VIRTUEL DE VOTRE MÉDECIN




Vous pouvez rejoindre le cabinet virtuel de votre médecin. Celui-ci aura accès aux données de votre profil glycémique à distance, depuis son compte professionnel LibreView.

- 1 - Menu >> Paramètres du compte
- 2 - Cliquez sur l'onglet Mes Cabinets

Entrez l'identifiant de cabinet de votre médecin et cliquez sur « Ajouter »

Identifiant du cabinet LibreView (à remplir par votre médecin)

Visualisez vos rapports d'analyse

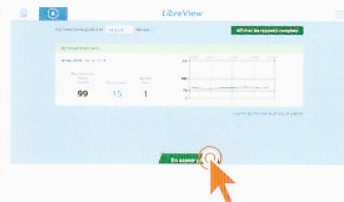

VISUALISEZ VOS DONNÉES

- 1 - Cliquez sur l'icône «  » en haut à gauche de l'écran
- 2 - Si vous utilisez l'application FreeStyle LibreLink et le lecteur FreeStyle Libre, choisissez le lecteur depuis lequel vous souhaitez visualiser les données dans « Lecteurs disponibles » en bas à gauche de l'écran
- 3 - Cliquez sur « Afficher les rapports complets »

www1.libreview.com

Si vous avez besoin d'aide, **contactez le support technique** par téléphone

N° Vert 0800 10 11 56

ou au **01 45 60 34 34**

de 8h à 18h30 du lundi au vendredi

(appel de l'étranger, DROM-COM ou autre opérateur)*



Transmission automatique des données avec l'appli FreeStyle Libre Link



Visualisation de votre profil glycémique : 7 rapports d'analyse disponibles



Gain de temps en consultation : pensez à télécharger vos données avant votre rendez-vous médical

(*) Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, sur la sécurité des données informatiques, vous avez droit d'accès, de correction et de suppression des données vous concernant auprès de Abbott Diabète Care, 12 rue de la Couture 94528 Rungis Cedex.